

I. osztályú orvostechnikai eszköz az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 745/2017/EU rendelet (MDR) szerint, és mint ilyen, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek.

Az orvostechnikai eszköz helyes rendeltetésének és optimális működésének biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt első alkalommal használja. Ellenőrizze a termék megfelelő külső megjelenését és integritását, valamint a csomagolás sértetlenségét.

A CSOMAG TARTALMA: 1 kerekesszék öv, 1 használati útmutató, 1 reklámlap.


INDIKÁCIÓK: A beteg kényelmes rögzítése a kerekesszékhez, mely megakadályozza az esetleges leeséseket. Olyan betegek számára, akik hajlamosak lecsúszni az ülésen. Bővítés lehetősége a személyre szabott adaptációhoz a CAD16 hosszabbítóval kombinálva.

KONTRAINDIKÁCIÓK: A termék használata ellenjavallt a páciens izgatottsága esetén, valamint olyan páciensek esetében, akik leválaszthatják magukról az eszközt, vagy önállóan ki tudják oldani a csatokat. Ne használja allergia esetén valamely összetevőre.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK: Javasoljuk, hogy a terméket megfelelő végzettségű, szakképzett személy helyezze fel. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az eredeti terméket nem szabad módosítani. A termék nem érintkezhet közvetlenül sérült területtel. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzék és kövessék nyomon a termék helyes használatát a felhasználó által. Soha ne hagyja az eszközt olyan gyermekek és / vagy személyek számára elérhető helyen, akik nem tudnak vigyázni magukra. Az alkatrészek textil jellegéből adódóan ne tegye ki a terméket hőforrásnak. Nincsenek ismert mellékhatások.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:

- 1 Helyezze a medence-részt a szék ülésére, és vezesse át a pántokat a szék oldalain.
- 2 Ültesse a páciens a termék medence-részére.
- 3 Zárja be a csatot a medencénél (szürke szín).
- 4 Helyezze a hasi részt a betegre, és zárja be a csatot (fekete szín).

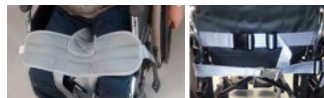


MÉRETÁBLÁZAT:

MÉRET	PÁRNÁZOTT HOSSZ	MAGASSÁG KÖZÉPEN	TELJES KERÜLET
0	40 CM	12,5 CM	1,50 CM
1	56 CM	16,5 CM	1,50 CM

ÖSSZETÉTEL: 100% poliészter laminált szövet. Pánt: 100% poliészter. Csat: Acetál. Fonál: 100% Nylon

TÁROLÁS ÉS ÁPOLÁS: Gépi mosás legfeljebb 60 °C-on. Tilos vegytisztítani vagy vasalni. Ne szárítsa szárítógépben. Mosáskor csukja be a csatot. Ne használjon fehérítőszert. Tárolja száraz, fénytől védett helyen, szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásában.

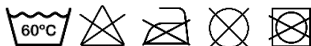


HASZNÁLAT: Terápiás céljaira tekintettel ezt a terméket más személy nem használhatja fel újra.

HULLADÉKKEZELÉS: A hulladékkezelés tekintetében a termék és alkatrészei megfelelnek a helyi hatóságok által megállapított hatályos rendelkezéseknek.

JÓTÁLLÁS: 24 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A kártérítés az áru értékére korlátozódik. A következményes kártérítés kifejezetten kizárt.

Gyártó:

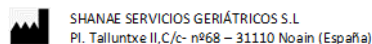

SHANAE SERVICIOS GERIÁTRICOS S.L.
Pl. Talluntxe II,C/c- nº68 – 31110 Noain (Espanña)

Forgalmazó:

Thuasne Hungary Kft.
1117 Bp, Budafoki út 60.

