



MOPEDIA®



CE I. osztályba tartozó orvosi eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓDOK

ST340 Swivwl párna

ST345 Ék alakú Memory Foam párna

ST346 Lombar Memory Foam párna

ST350L Memóriahab félhengeres párna L lábakhoz

ST350S Memóriahab félhengeres párna S lábakhoz

ST352 Hengerpárna TWIST

ST383-1 Félhengeres poliuretán bevonatú lábpozicionáló

ST383-2 Félhengeres poliészter bevonatú lábpozicionáló

ST385-1 Poliuretán bevonatú háromszög alakú, ergonomikus pozicionáló

ST385-2 Poliészter bevonatú háromszög alakú, ergonomikus pozicionáló

ST386-1 Poliuretán bevonatú, ergonomikus lábpozicionáló

ST386-2 Poliészter bevonatú, ergonomikus lábpozicionáló

ST387-1 Poliuretán bevonatú többfunkciós pozicionáló párna

ST387-2 Poliészter bevonatú többfunkciós pozicionáló párna

ST388-1 Poliuretán bevonatú ortopéd háttámasz párna

ST388-2 Poliészter bevonatú ortopéd háttámasz párna

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Moretti MOPEDIA sorozatához tartozó OPERA párnát. A párnákat úgy tervezték és alakították ki, hogy minden igényt kielégítsenek a praktikus, megfelelő és biztonságos használat érdekében. Ez a használati útmutató néhány javaslatot tartalmaz az Ön által kiválasztott termék helyes használatára vonatkozóan, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Ha kérdése van, forduljon a viszonteladóhoz tanácsért és segítségért.

3. RENDELTETÉS

A Moretti MOPEDIA termékcsalád betegpárnái olyan eszközök, amelyek a páciens megkönnyebbülését szolgálják ülés, pihenés, műtét utáni kúrák esetén.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
- A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott, a BETEGEK PÁRNÁK csoportjába tartozó termék megfelel az ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRE 2017. április 5-i 2017/745 számú rendelet előírásainak. Erre a célra a Moretti S.p.A. és kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745/EK rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.

3. Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT.
4. A készülékek NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.
Megjegyzés: A Moretti EU-megfelelőségi nyilatkozata tartalmazza a teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat.
Az S.p.A. kiadja és elérhetővé teszi csatornáin keresztül.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék megfelelő használatához.
- Ellenőrizze, hogy a terméket sértetlenül szállították-e ki, és tartsa hőforrásoktól távol.
- A készülék élettartamát a nem javítható és/vagy nem cserélhető alkatrészek kopása határozza meg.
- Mindig ügyeljen a gyermekek jelenlétére.
- Mindig konzultáljon orvosával vagy terapeutájával a készülék megfelelő használatához.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a beteg tartozik.

6.SZIMBÓLUMOK



Termék kód



Egyedi eszköz azonosító



CE jelölés



Gyártó



Tétel szám



Olvassa el a használati útmutatót



Orvosi segédeszköz



Ártalmatlanítási feltételek




NE használjon fertőtlenítőt




Kézi mosás; Maximális hőmérséklet: 30° C



Vegyileg nem tisztítható

 **NE szárítsa szárítógépben**

 **NE vasalja**

7. HASZNÁLAT ELŐTT

• Ellenőrizze az alkatrészek kopottságát, hogy garantálja a készülék teljes biztonságát az emberek és tárgyak számára

8. HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hagyja, hogy a készülék hosszú ideig vízzel érintkezzen.
- Ha kétségei vannak a használatról, beállítással vagy karbantartással kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz.
- A kockázatok elkerülése érdekében tartsa a készüléket gyermekektől távol


9. KARBANTARTÁS


A MORETTI MOPEDIA készülékeit gondosan ellenőrzik, és a piacra kerülést követően EC jelzéssel látják el.


10. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS


10.1 Tisztítás

Mosási jelzés a huzathoz, ha van:

 **NE használjon fertőtlenítőt**

 **Kézi mosás; Maximális hőmérséklet: 30°C**

 **Vegyileg nem tisztítható**

 **NE szárítsa szárítógépben**

 **NE vasalja**

FIGYELMEZTETÉS!

A termék nem mosható. **Csak a huzat mosható a fent leírtak szerint.**

Feltétlenül kerülje a savas, lúgos vagy oldószeres termékek, például aceton vagy hígítószer használatát.

11. ÁLTALÁNOS ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

Ártalmatlanítás esetén ne használja a behelyezett edényt a kommunális hulladékhoz.

Javasoljuk, hogy a fürdőszéket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre dobja újrahasznosítás céljából.

12. MŰSZAKI JELLEMZŐK

KÓDOK	ANYAG	FEDŐ	MÉRET
ST340	100% poliészter	100% pamut	∅44 x 4 cm
ST345	poliuretán	100% poliészter	41x41x3/7 cm
ST346	Poliuretán öntött	100% poliészter	33x35x9/3 cm
ST350S	poliuretán	100% poliészter	35x20x10 cm
ST350L	poliuretán	100% poliészter	50x20x10 cm
ST352	Poliuretán Mervev önthető mag	100% poliészter	65x ∅11.5 cm
ST383-1	Poliuretán D28 vágás	100% poliuretán láng késleltető, légáteresztő, vízálló, bi-elasztikus, nem mérgező, hipoallergén, mosható	50x24.5x9.5 cm
ST383-2	Poliuretán D28 vágás	100% poliészter	50x24.5x9.5 cm
ST385-1	Poliuretán D36 vágás	100% poliuretán láng késleltető, légáteresztő, vízálló, bi-elasztikus, nem mérgező, hipoallergén, mosható	60x25x20 cm
ST385-2	Poliuretán D36 vágás	100% poliészter	60x25x20 cm
ST386-1	Vágott poliuretán alap, felső oldala 2 cm-es memóriahab	100% poliuretán láng késleltető, légáteresztő, vízálló, bi-elasztikus, nem mérgező, hipoallergén, mosható	67x54x20 cm
ST386-2	Vágott poliuretán alap, felső oldala 2 cm-es memóriahab	100% poliészter	67x54x20 cm
ST387-1	Poliuretán D36 vágás	100% poliuretán láng késleltető, légáteresztő, vízálló, bi-elasztikus, nem mérgező, hipoallergén, mosható	50x61x27/1 cm
ST387-2	Poliuretán D36 vágás	100% poliészter	50x61x27/1 cm
ST388-1	Poliuretán D27 vágás	100% poliuretán láng késleltető, légáteresztő, vízálló, bi-elasztikus, nem mérgező, hipoallergén, mosható	60x60x45 cm
ST388-2	Poliuretán D27 vágás	100% poliészter	60x60x45 cm

Megjegyzés: Minden termék tűzálló az EN1021-1 szabvány szerint, de ajánlott fokozottan figyelni a nyílt lángot, mivel a termékek még meggyulladhatnak

13. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett. A jótállás nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy módosításából eredő károkra, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A Moretti nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek személyi sérülésből vagy más módon a helytelen telepítésből vagy nem megfelelő használatból erednek. A Moretti nem vállal garanciát a termékekre a következő esetekben: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ha van), nem a Moretti által szállított alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett átalakítás, szállítási sérülések (kivéve a Moretti eredeti szállítmányát), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék helyes használata során elhasználódnak.

13.1 Mentességi záradékok

A jelen jótállásban és a törvényben meghatározott korlátok kivételével a Moretti nem kínál semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos képviselést, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és a beavatkozásra vonatkozó nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket. . A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által esetlegesen előírt vélelmezett jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozását, illetve a fogyasztóknak szánt termékekkel kapcsolatos véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását. Ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás bizonyos felelősség kizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül megváltozhat.



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com